



Poste de nettoyage des yeux TOBIN

Liquide de nettoyage des yeux TOBIN (solution d'eau saline stérile à 0,9% identique au liquide lacrymal) pour nettoyer en urgence des yeux ayant été en contact avec des produits chimiques ou des parties solides.

Poste de nettoyage mural TOBIN comprenant:

- un support mural en matières synthétiques (hauteur = 34 cm / largeur = 20 cm / profondeur = 10 cm)
- 2 bouteilles à usage unique contenant chacune un litre de solution d'eau saline stérile à 0,9%, avec embout intégré pour maintenir l'oeil ouvert
- instructions trilingues
- matériel de montage inclus



autre image

Emplacement du poste mural

Le poste de nettoyage des yeux doit être placé à proximité immédiate du poste de travail et pouvoir être trouvé à l'aveuglette par la personne blessée, sans aucune aide extérieure, pour laver l'oeil immédiatement et longtemps afin de limiter les lésions éventuelles.

Utilisation

Contact avec des éléments solides: nettoyer jusqu'à ce que l'oeil soit à nouveau propre puis consulter un ophtalmologue

Contact avec des acides et des bases: nettoyer immédiatement à grande eau pendant plusieurs minutes et faire venir le médecin ou appeler le 144. Ce nettoyage est à poursuivre jusqu'à l'arrivée des secours.

Durée de conservation

Température normale: 3 ans env. (voir date de péremption sur la bouteille).

Température supérieure à 30° C: 2 ans env.

Verso du support mural : Matériel de montage inclus

